


# Guía de la App de Alérgenos

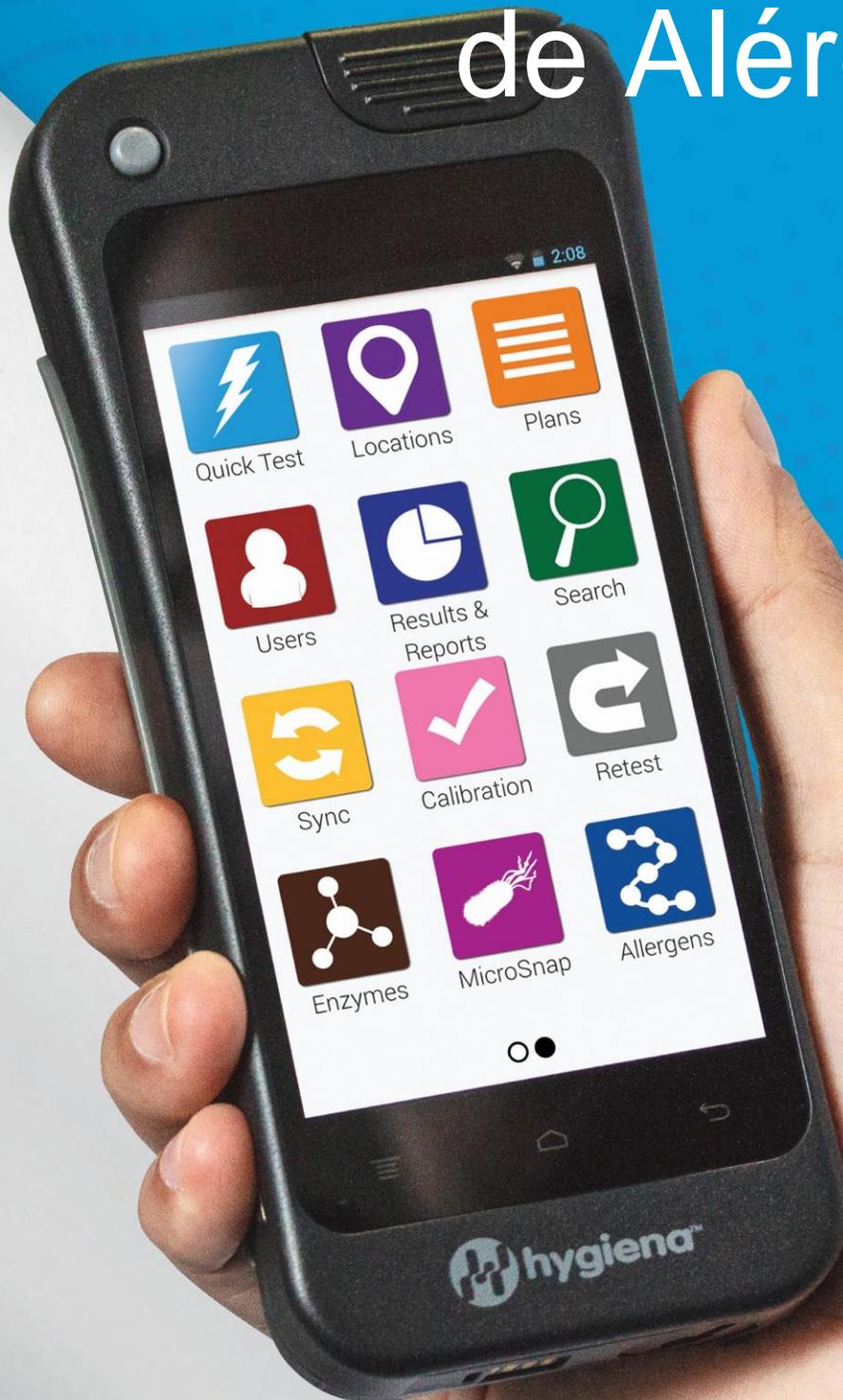

# Presentamos la nueva aplicación de alérgenos para EnSURE™ Touch

Con la nueva App de Alérgenos, puede sacar más provecho a su EnSURE™ Touch y además de almacenar datos de múltiples pruebas en el software SureTrend™ Cloud.


## Dispositivos de válvula:



Área de muestra




Activar y esperar el cambio de color

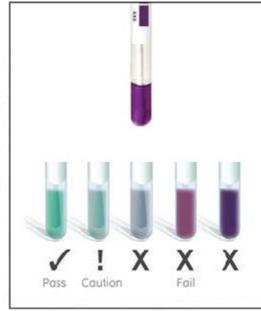


Observar el cambio de color


## Tiras de flujo lateral:

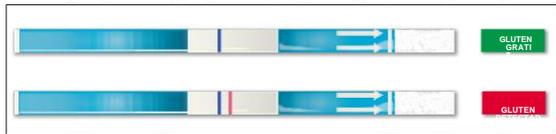


Tiras GlutenTox®Pro

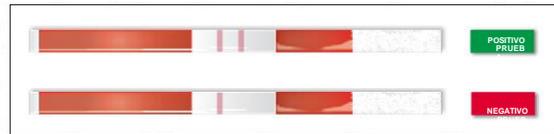

®Titas AlerTox

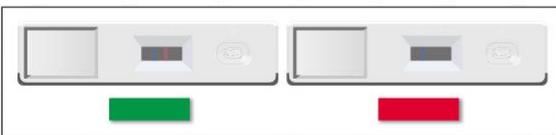

Casete AllerFlow

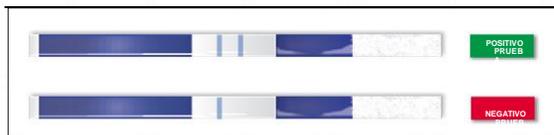

®Tiras Alertox

## Qué hacer con los resultados:



Registre los resultados (usando la aplicación ET Alérgenos)



Informes en el SureTrend™Cloud




## Beneficios:

- Los datos registrados en el EnSURE™ Touch se sincronizan automáticamente con SureTrend™ Cloud. Al registrar los resultados en su EnSURE™ Touch, los datos se sincronizan automáticamente con la nube, pudiendo ser visibles para los miembros de su equipo con acceso a SureTrend™ Cloud.
- Registrar todos los datos de sus tests de Alérgenos: AlerTox® Sticks, AllerFlow Gluten, AllerSnap™, GlutenTox® Pro y PRO-Clean™, todo en un solo lugar.
- Exporte los resultados de las pruebas de alérgenos o cree informes a través de SureTrend™ Cloud.
- Múltiples indicadores de calidad en un solo instrumento: ATP, Microorganismos, Enzimas y Alérgenos.
- Realice un seguimiento de todos sus resultados en un solo lugar con SureTrend™ Cloud.

## Instrucciones:


Antes de habilitar la aplicación Alérgenos, verifique que su EnSURE™ Touch está conectado a una red Wi-Fi y realice una actualización del software.

- 1) Pulse el ícono de Configuración en la pantalla de inicio y
- 2) Seleccione Personalización
- 3) Elija Selección de Productos.

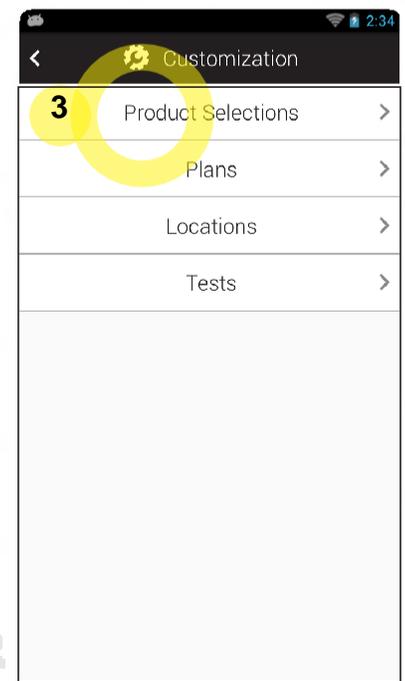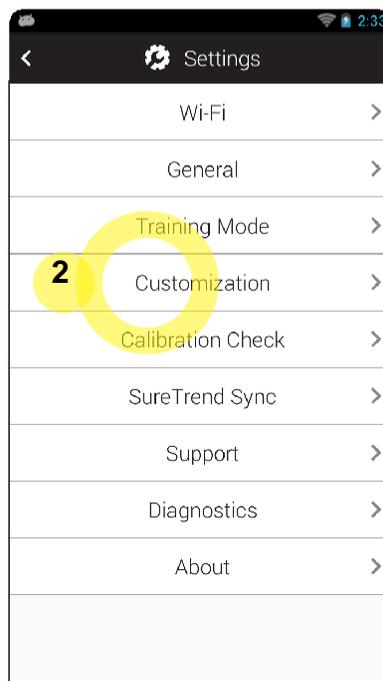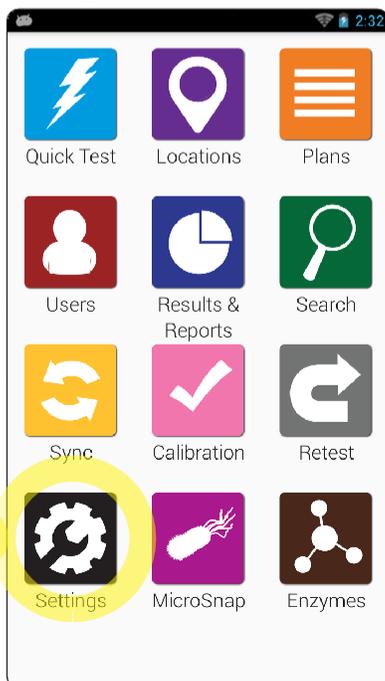


Para activar la aplicación de alérgenos, 1) active el botón correspondiente. Si lo desea, puede desactivar cualquier prueba de alérgenos que no utilice.

2) Volver a la pantalla de inicio donde verá la App de Alérgenos en azul.



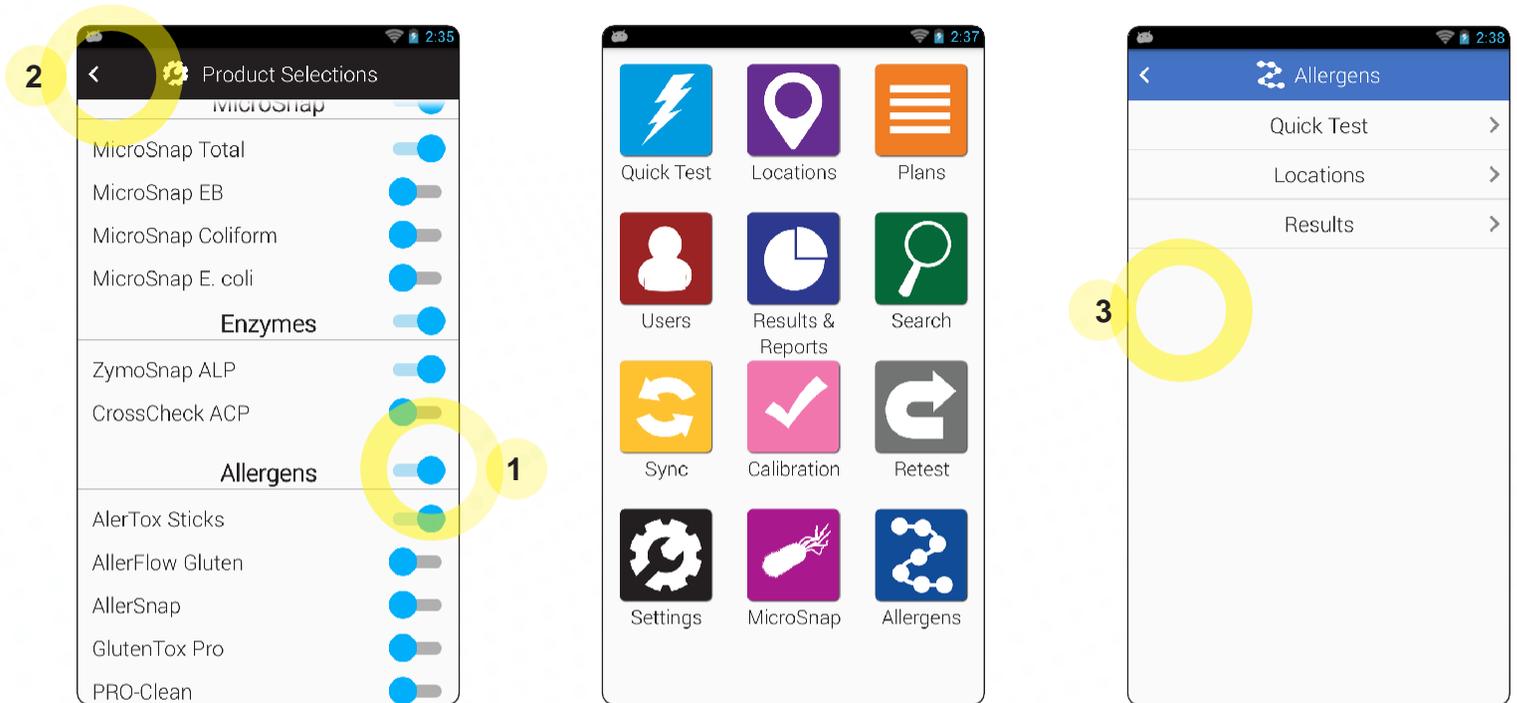


Dentro de la App de Alérgenos hay dos secciones: Prueba Rápida y Ubicaciones. Use Prueba Rápida para realizar pruebas sobre la marcha o para las que no tenga configurado alguna ubicación. Las ubicaciones son las superficies programadas o productos que se están probando.

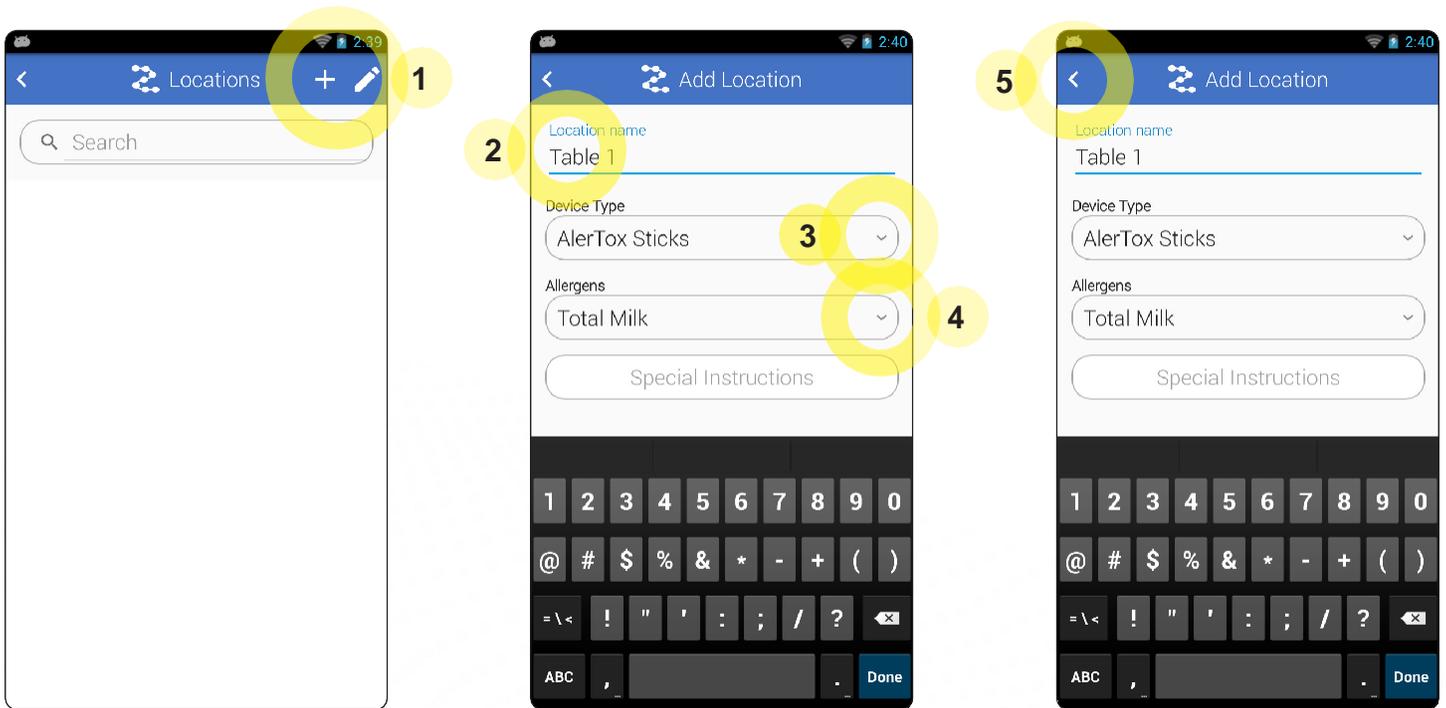

1) Para agregar una ubicación, haga clic en el signo +. 2) Asigne un nombre la ubicación que va a muestrear, 3) elija el tipo de dispositivo y 4) defina el alérgeno que está probando. 5) Para guardar la ubicación, toque la flecha hacia atrás en la esquina de la parte superior izquierda.

Una vez que se haya creado una ubicación, comience la prueba seleccionando la ubicación deseada. La ubicación se completará previamente con el tipo de dispositivo de prueba y alérgeno que haya definido previamente para ello.

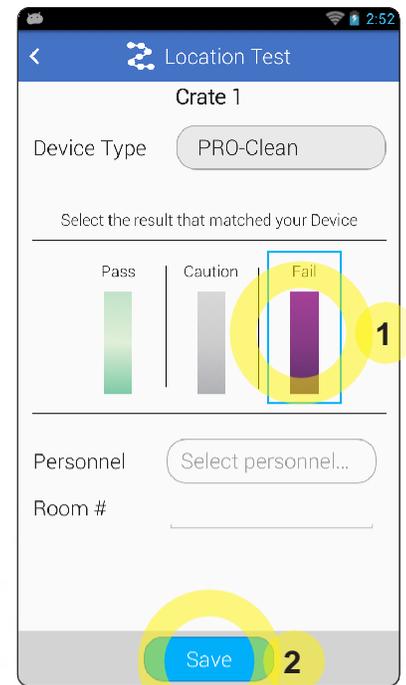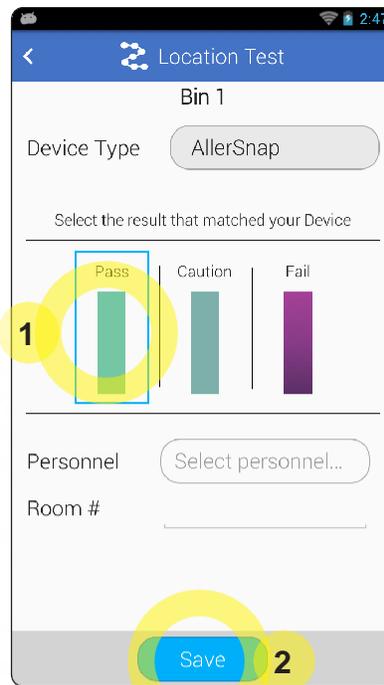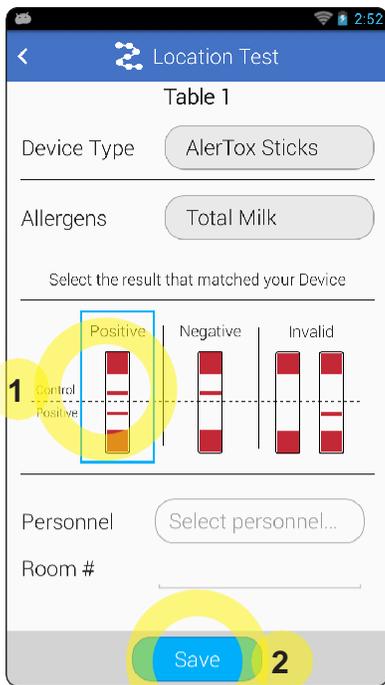

Para **AlerTox® Sticks**, una vez obtenido el resultado en la tira de flujo, regístrelo en su EnSURE™ Touch eligiendo: 1) Positivo, Negativo o Inválido. Indique la persona que realizó la prueba y complete las secciones personalizadas que haya seleccionado para rellenar. 2) Haga clic en Guardar y Listo. Cuando esté conectado a WiFi, los datos se sincronizarán con el software SureTrend™ Cloud.

Del mismo modo para **AllerSnap™**, examine el dispositivo de prueba y registre los resultados en su EnSURE™ Touch eligiendo 1) Pasa, Precaución o Falla. Indique la persona que realizó la prueba y complete las secciones personalizadas que haya seleccionado para informar. 2) Haga clic en Guardar y Listo. Cuando esté conectado a WiFi, los datos se sincronizarán con el software SureTrend™ Cloud.

Para **PRO-Clean™**, examine el dispositivo de prueba y registre los resultados en su EnSURE™ Touch eligiendo 1) Pasa, Precaución o Falla. Indique la persona que realizó la prueba y complete las secciones personalizadas que haya seleccionado para informar. 2) Haga clic en Guardar y Listo. Cuando esté conectado a WiFi, los datos se sincronizarán con el software SureTrend™ Cloud.

Para preguntas adicionales sobre EnSURE™ Touch o SureTrend™ Cloud, por favor contacte con su distribuidor o con **BC**



BC Aplicaciones Analíticas, S.L.

Josep Anselm Clavé, 32-34 Local 2

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona,

Tel. 934700505

[info@bcaplicaciones.com](mailto:info@bcaplicaciones.com) [www.bcaplicaciones.com](http://www.bcaplicaciones.com)



[hygiena.com](http://hygiena.com) | [help.hygiena.com](http://help.hygiena.com)

941 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012 | 800.863.6842 EE. UU. | 302.695.5300 Int.

Hygiena™ y “ENSURE™” son marcas registradas de Hygiena™ LLC.

